

Lukke instruktioner for Pacazur®



SE
INSTRUKTIONER
PÅ VIDEO


VIGTIGT

TRYK ELLER PRES IKKE AFFALDET NED I BEHOLDEREN
BORTSKAF AFFALDET SOM LOKALE AFFALDSBESTEMMELSER
FORESKRIVER
FYLD IKKE OVER FYLDE-LINJEN - ENGANGSBEHOLDERE GENBRUGES IKKE


<http://www.pacazur.fr/downloads/PACAZUR.MP4>

MONTAGE AF LÅG :

1) Placer låget på beholderen

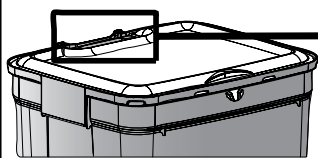

2) Klik lågets to
hængsler fast
på beholderen

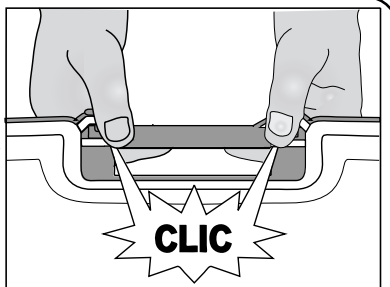

STATIV

Montering :


- 1) Placer beholderen med låget monteret og lukket
- 2) Løft låget, så det står oprejst og indsæt den øverste stang i det lille håndtag



Afmontering: Fjern stangen, luk boksen og løft beholderen op fra stativet.

MIDLERTIDIG LUKNING

Standard låg

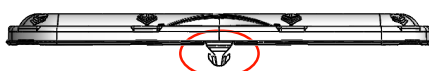

Midlertidig lukning:

Tryk på toppen af låget ved splitten så vingerne klemmes ud.

Åbning af låget:

Klem vingerne sammen ved splitten.




Skruelåg

Position 0 : montering - tryk proppen i ▽ og i ◊ for indsætte.



Position 1 : Åbn med hængslet

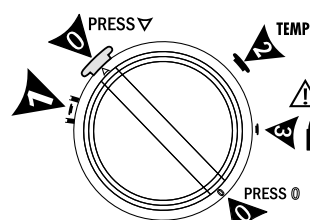

Position 2 : midlertidig lukning

Position 3 : permanent lukning


Brug ikke håndtaget på den lille lås-i-låget for at løfte beholderen

PERMANENT LUKNING

BEMÆRK:

SØRG FOR AT LÅGET PASSER PRÆCIST I BEHOLDERENS KANT INDEN LÅGET KLIPSES FAST, ISÆR HVIS BEHOLDEREN ER BLEVET VREDET EN SMULE VED OPFYLDNING.


- Tjek at der ikke er noget der stikker ud af containeren
- Vær sikker på at kanterne på både beholder og låg er tørre for at hindre lækage fra beholderen

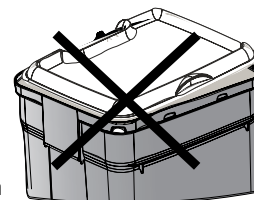

KLIKLÅG


Tryk låg og beholder sammen ved at presse enkeltvis på hver af lågets

11 låse-mekanismer (alle mærket "PRESS")

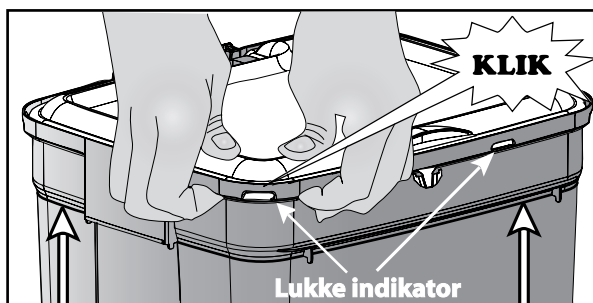

**FYLDE-LINJE GRÆNSE
FYLD IKKE OVER LINJEN**

BESKYT DIG SELV MOD
MUSKEL- OG KNOGLESKADER

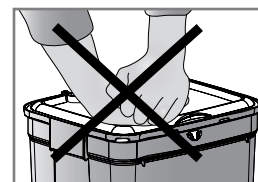

TRYK KANTEN AF LÅGET OG
BEHOLDEREN SAMMEN FOR
EN ENKELT OG SIKKER LUKNING

Alle brugsanvisninger bør omfatte en korrekt kontrol ved lukning af beholderen når den når sin fyldningsgrænse (ISO 23907)
- En "KLIK-LYD" indikerer tydeligt, at beholderen er lukket korrekt
- Som EKSTRA SIKKERHED kan man checke, at det hvide låg er synligt i låse-området under den gule kant



Pacazur®

Designed, Manufactured in France