

# OSOM Strep-A

Sensitivitet: 96 %  
Specifitet: 97,80 %  
Antal reagenser: 2  
Antal test: 20/52  
Varenummer: 11141  
Skup afprøvet  
FDA godkendt



- 1 Dryp først 3 fritfaldende dråber fra reagens 1 i testrøret. Rosa farve.
- 2 Dryp derefter 3 fritfaldende dråber fra reagens 2 i testrøret. Lysgul farve.
- 3 Lav en halspodning med den medfølgende swab. Placér swaben i testrøret og drej swaben rundt i testrøret mindst 10 gange. Vent 1 minut. Tryk testrøret sammen om swaben og vrid det sidste reagens ud af den. Smid swaben væk.
- 4 Placér en teststrimmel i prøverøret. Aflæs resultatet efter senest 5 minutter.  
  
Et positivt resultat kan aflæses ligeså snart der er en rød kontrollinie og en blå testlinie. Oftest efter 1 minut.
- 5 Aflæsning af resultatet.

## Positivt:

En blå testlinie og en rød kontrollinie  
OBS: Den blå testlinie kan have en hvilken som helst blå nuance.

## Negativt:

Der kommer kun en rød kontrollinie.




1 minut



1-5 minutter



Positivt

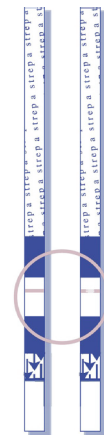

Negativt

**MG** MediGroup

Kajerødgade 38  
DK-3460 Birkerød  
45 76 54 25  
info@medigroup.dk