

BRUGSANVISNING



GYNÆKOLOGSTOL, SØJLE



REF

Gælder følgende model:
016-5000, 016-5020

Det anbefales, at operatøren læser brugsanvisningen igennem, inden produktet anvendes, for at undgå unødige risici for operatøren eller produktet. Med operatør menes personale eller patient. Regulering af stolen kræver ingen uddannelse eller særlige kvalifikationer.

Vær særligt opmærksom på følgende:

- * Hjulene skal være låste, når man sætter sig i stolen.
- * Stolen skal være i laveste position, når man sætter sig i den.
- * Sid aldrig på benstøtten eller rygstøtten.
- * Børn (14 år eller yngre) regnes ikke som operatører og må ikke regulere stolen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord, Garanti, Vigtig information

1. Funktionsbeskrivelse

- 1.1 Generel beskrivelse
- 1.2 Tag højde for følgende inden udpakning
- 1.3 Tilsigtet anvendelse
- 1.4 Klinisk nytte
- 1.5 Klinisk ydeevne

2. Betjening

- 2.1 Når patienten sætter sig
- 2.2 Tilslutning
- 2.3 Hævning/sænkning af stolen
- 2.4 Hævning/sænkning af rygstøtten
- 2.5 Hævning/sænkning af shocklejet/sædedelen
- 2.6 Udskiftning af papirrulle
- 2.7 Hjulenes funktion
- 2.8 Batteribackup
- 2.9 Benplade
- 2.10 Patienthåndtag
- 2.11 Benstøtte
- 2.12 Nakkepude
- 2.13 Låsegrebens funktion
- 2.14 Sædehynde
- 2.15 Skylleskål

3. Vedligeholdelse og rengøring

- 3.1 Løbende kontroller
- 3.2 Rengøring
- 3.3 Tilbehør
- 3.4 Reservedele

4. Tekniske specifikationer

- 4.1 Produktets levetid
- 4.2 Dimensioner
- 4.3 Motorer og styreenheder
- 4.4 Batteribackup
- 4.5 Bortskaffelse af produktet

5. Kontaktoplysninger

FORORD

Tillykke med, at du nu er ejer af en gynækologstol fra Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB. Vi håber, at du bliver tilfreds med vores kvalitetsprodukt. Hvis der skulle opstå problemer med nogle af vores produkter, er du altid velkommen til at kontakte os.

Denne brugsanvisning indeholder alle nødvendige oplysninger til produktets anvendelse, vedligeholdelse og service. Dokumentet opdateres løbende, efterhånden som produkterne ændres. Vi tager derfor forbehold for eventuelle ændringer i brugsanvisningen.

GARANTI

Sjöbloms giver 2 års garanti for materiale-, konstruktions- og fabrikationsfejl på den betingelse, at produkterne ikke har været udsat for ydre påvirkning eller unormal slitage.

For at garantien skal gælde

- * skal produktet være anvendt i henhold til brugsanvisningen.
- * skal der være udført service i henhold til specifikationerne
- * må der kun være anvendt originale reservedele.

VIGTIG INFORMATION

Dette produkt er beregnet til professionel medicinsk brug. Brugsanvisningen skal læses nøje igennem, inden produktet tages i brug, for at forebygge unødige risici for patient og operatør. Brugsanvisningen indeholder advarsler i tilfælde, hvor der er risiko for personskade. Disse advarsler skal følges. Forkert betjening kan medføre fare. Der vises en advarselstrekant der, hvor der er særlig vigtig information.



Advarselstrekant

VED ALVORLIGE HÆNDELSER

Alle alvorlige hændelser, der er sket i forbindelse med produktet, bør indberettes til Sjöbloms samt til den kompetente myndighed, hvilket i Danmark er Lægemiddelstyrelsen.

1. FUNKTIONSBESKRIVELSE

For at sikre korrekt brug anbefales det, at brugsanvisningen læses igennem, før produktet tages i brug første gang.

1.1 Generel beskrivelse

Stol med elektrisk regulering af højde og shockleje/sædevinkel. Manuel regulering af rygstøtte som standard, elektrisk fås som tilvalg. Forkromet chassis af helsvejste stålrør. Hynderne er fyldt med skumplast og beklædt med kunstlæder. 100 mm hjul med centrallås.

1.2 Tag højde for følgende inden udpakning



Der må ikke bruges en gaffeltruck eller lignende til at løfte eller forflytte stolen, da dette kan beskadige netledningen og/eller motorpakken.

1.3 Tilsigtet anvendelse

Stolen anvendes i et undersøgelseslokale af en patient og reguleres af patienten eller sundhedspersonalet i forbindelse med en plejesituation for voksne og børn.

1.4 Klinisk nytte

Gynækologstolene er trygge, sikre og behagelige for den, som sidder i stolen, børn såvel som voksne. Dens udførelse gør det også nemt for personalet, som arbejder ved den, at udføre pleje og kontrol af patienten. Stolene fungerer derfor ergonomisk optimalt for såvel patienten, som sidder kortvarigt i stolen, og for personalet, som sidder i eller står ved stole hele arbejdsdagen.

1.5 Klinisk ydeevne

Gynækologstolen har elektrisk regulering af højde, shockleje/sædedel og rygstøtte. Inkl. nakkepude, patienthåndtag og benplade, der kan trækkes ud, hvor benene kan hvile på.

Benstøtten fastsættes på tilbehørsskinner, der løber langs sædehynden. Skinnerne kan også anvendes til at fastgøre diverse tilbehør.

Dimensioner LxB samt maks. belastning er tilpasset til plejesituationen for voksne og børn i henhold til Tilsigtet anvendelse. Motorerne reguleres med hånd- eller fodstyring, afhængigt af udførelse.

Stolene har en lav bundposition, så alle brugere nemt og sikkert kan sætte sig i eller rejse sig fra stolen. En lav bundposition gør det også nemmere, hvis en patient skal forflyttes fra f.eks. en kørestol eller seng.

De har også en høj øverste position, så personalet eventuelt kan udføre forskellige plejesituationer stående under lange arbejdsperioder. Denne variation giver bedre ergonomi.

Stolene har hjul med centrallås, der låses og frigøres med et enkelt pedaltryk. Hjul med centrallås gør det nemmere at placere stolen i et rum eller forflytte den mellem forskellige rum. De gør det også nemmere under rengøring. De kraftfulde hjul er også tilpasset til kortere transport af patienter, hvor der opstår shock. Det er derefter en stor fordel, at patienten ved akut behov kan transporteres i samme stol uden at skulle forflyttes til en anden stol eller et andet leje.

2. BETJENING

2.1 Når patienten sætter sig

For at opnå størst mulig sikkerhed er det vigtigt, at personalet hjælper patienten med at sætte sig rigtig i stolen. Dette omfatter også placeringen af selve gynækologstolen. Inden undersøgelsen:

1. Placer hjulene i den retning, der vises på billedet.
2. Lås centrallåsen ved at trykke bøjlen nedad. Hjulene skal altid være låst under undersøgelsen!
3. Sænk stolen til den laveste position. Hjælp patienten med at sætte sig midt på sædehynden OG læne sig mod rygstøtten, inden stolen hæves.
4. De forkromede patienthåndtag giver god støtte, når man skal rejse sig. Det er vigtigt, at man holder i disse og ikke i benstøtterne, der ikke er beregnet til dette formål.



2.2 Tilslutning af gynækologstol

Stikket skal tilsluttes til en 230 V-stikkontakt med jord. Gynækologstolen er nu klar til brug.

2.3 Hævning/sænkning af stolen

Følg pilene, når stolen skal reguleres op og ned. På håndstyringen reguleres højden på 2. knapække.



Fodstyring



Håndstyring



Vær opmærksom, når stolen reguleres. Uvedkommende må ikke opholde sig inden for stolens arbejdsområde.

2.4 Hævning/sænkning af rygstøtten



Fodstyring



Håndstyring



Følg pilene. På håndstyringen reguleres rygstøtten på 3. knaprække.

2.5 Hævning/sænkning af sædedel/shockposition


Følg pilene. På håndstyringen reguleres sædevinklen på 1. knaprække. Knaprække 5 aktiverer shocklejet.

Knaprække 4 på håndstyringen samt den ene fodpedal aktiverer det, vi kalder Behandlings- og startposition. Når patienten har sat sig, og denne funktion aktiveres, føres patienten bagud i 5 sekunder. Derefter reguleres højde/vinkel/rygstøtte samtidigt, og stolen reguleres til den ønskede position.

2.6 Udskiftning af papirrulle

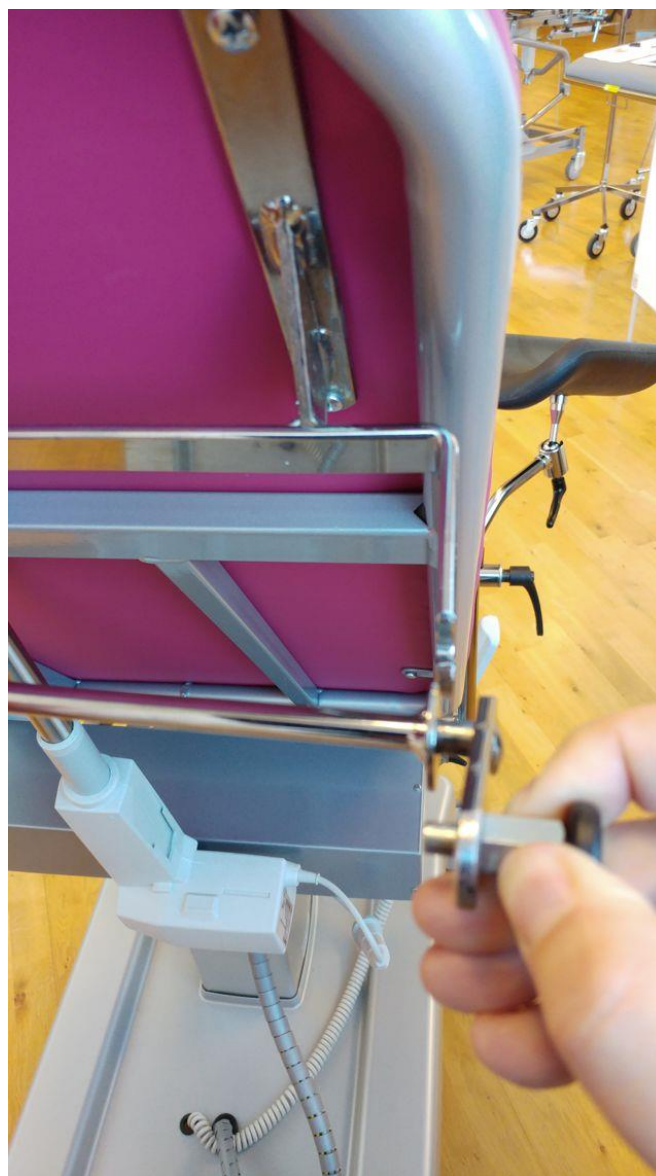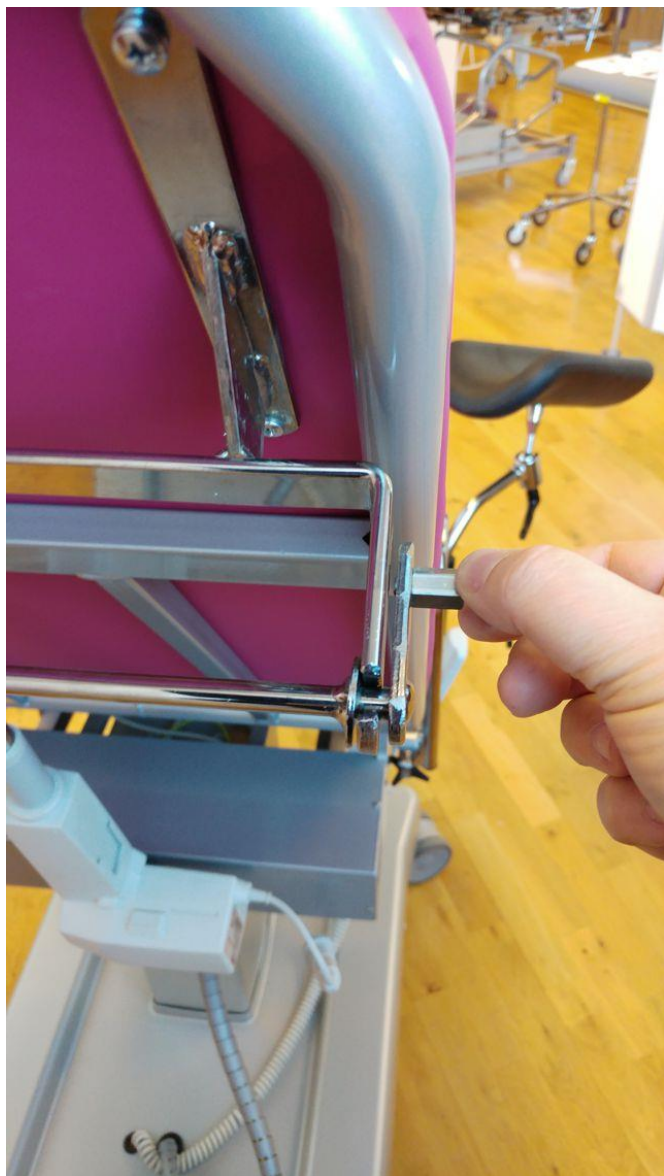

1. Træk hurtiglåsen ud.
2. Drej låsen opad.
3. Fjern stålet fra hullet på den modsatte side, og træk papirrullen på.
4. Placer stålet i hullet til venstre, og sæt hurtiglåsen tilbage.

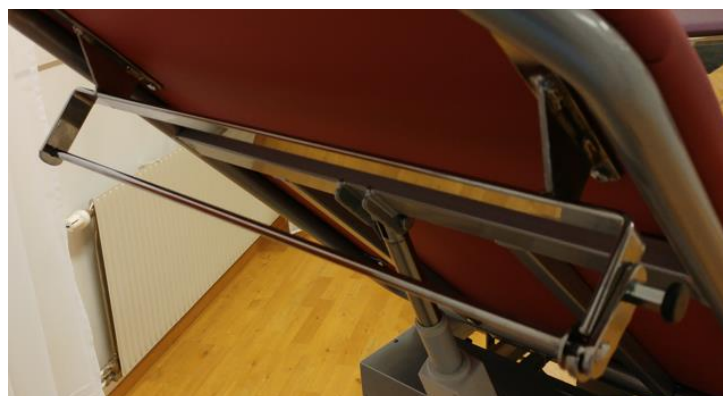

2.7 Hjulenes funktion

Gynækologstolen har hjul med centrallås.



Bremset



Ubremset

2.8 Batteribackup

Batteribackup (tilvalg), der muliggør drift også ved strømafbrydelser, kan tilsluttes bag på stolen.




2.9 Benplade

Benpladen er placeret under sædet.



Træk benpladen mod dig selv, så den hæves foran.

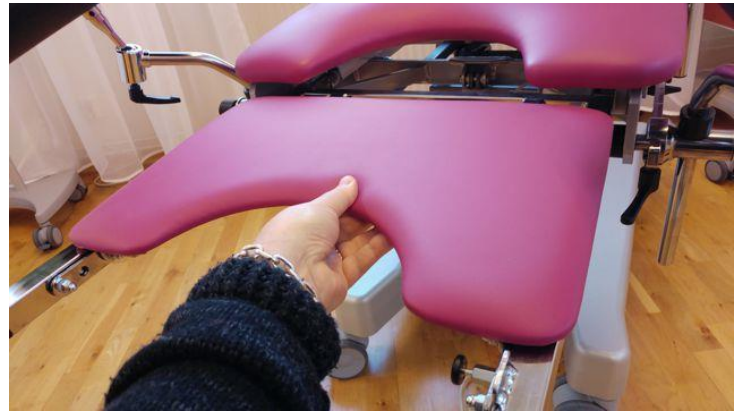


Når du har trukket den helt ud, skal du løfte den forsigtigt. Derefter låser hurtiglåsen benpladen på plads. FÆRDIG!




For at sætte den tilbage skal du trække i hurtiglåsen og trykke benpladen fremad, så den klappes ned. Tryk benpladen ind under sædet. FÆRDIG!



OBS! Benpladen er kun en støtte, som benene kan hvile på. Den er ikke beregnet til at sidde på. Skader, der skyldes forkert brug, er ikke omfattet af garantien.

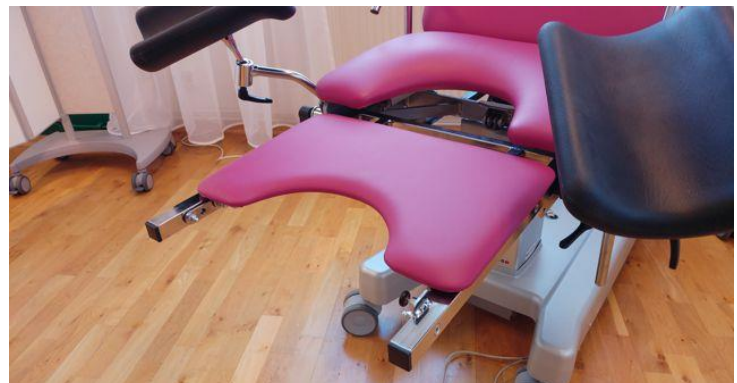

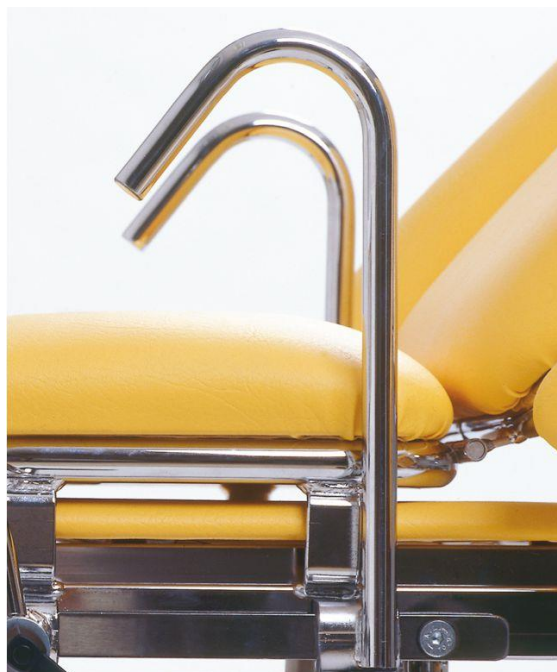

Patienthåndtag



Benstøtte

2.10 Patienthåndtag

Patienthåndtagene kan reguleres langs tilbehørsskinnerne og fjernes helt fra skinnen efter behov.

2.11 Benstøtte


Den del af benstøtten, som patienten hviler benet på, udgøres af Integralskum og kan indstilles trinløst ved hjælp af et kugleled. Benstøtten kan også reguleres trinløst op og ned samt frem/tilbage langs skinnen. Bemærk, at det beslag, som benstøttens stålrør går ned i (en såkaldt klemme), udgøres af en højre og en venstre side. Hvis de ender på den forkerte side, rettes benstøtten bagud og ikke fremad, som vist på billedet.

2.12 Nakkepude



Nakkepuden kan føres op og ned manuelt af personalet eller patienten.

2.13 Låsegrebenes funktion

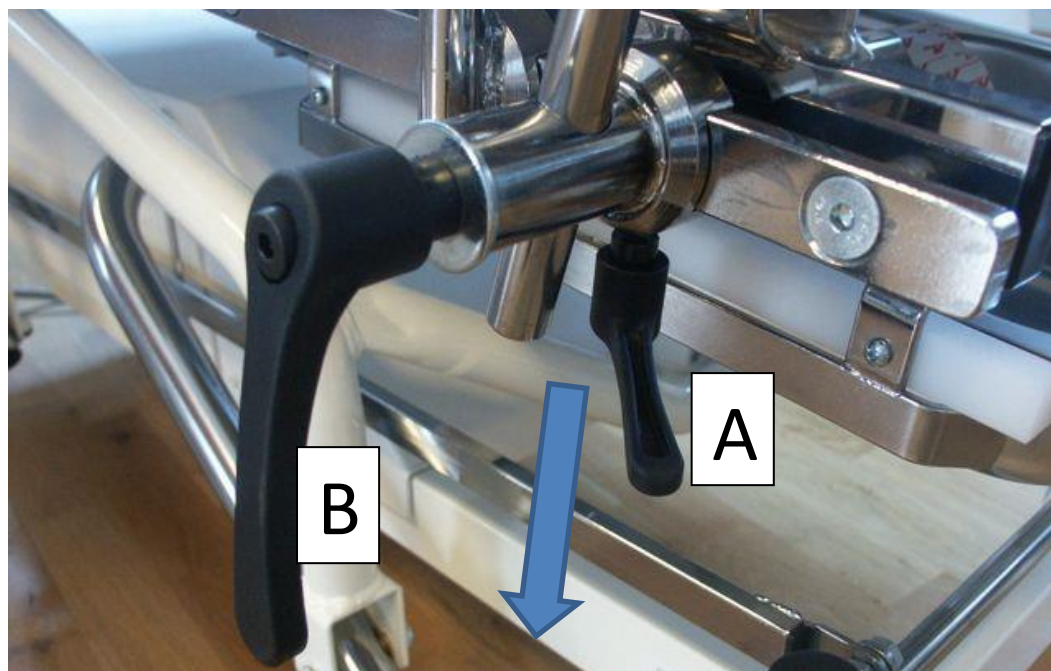

Grebene (A og B) spændes med uret og løsnes mod uret.

Som det fremgår af billedet, er der trangt dér, hvor greb A sidder. Derfor kan dette greb ikke drejes 360 grader. Gør følgende, hvis det bliver nødvendigt:

1. Træk grebet nedad i pilens retning (slib ikke grebet). Dermed frigøres grebet, og man kan dreje det uden at påvirke spændingen.
2. Drej med eller mod uret, og slib grebet. Grebet er nu i en position, hvor det kan spændes med uret eller løsnes mod uret.



Gentag, indtil den ønskede spænding er opnået.



2.14-2.15 Sædehynde og skylleskål

Sædehynden og skylleskålen kan fjernes og rengøres.

2.14 Sædehynden: Træk hurtiglåsen ud, løft sædepladen, fjern og rengør den. Når du sætter hynden på plads igen, skal den vippes som vist på billedet, så den tynde del glider ind under stålet. Tryk derefter sædet på plads, så hurtiglåsen aktiveres.

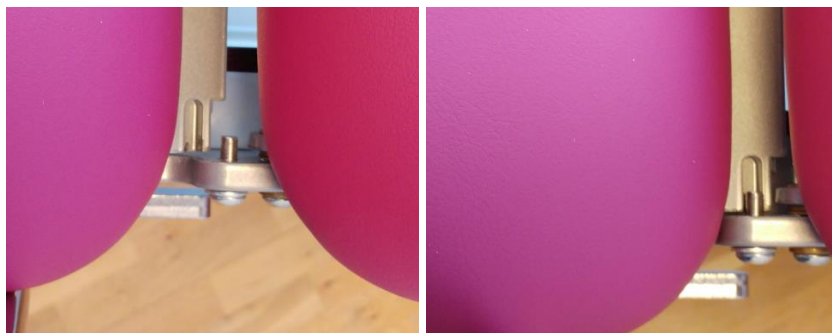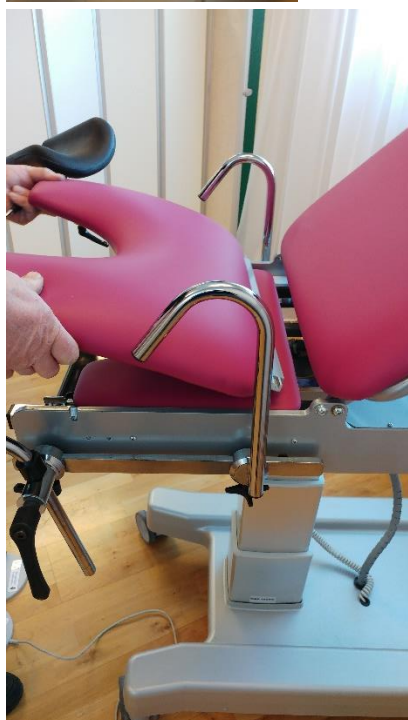

2.15 Skylleskålen

Træk ud, og løft den væk.



3. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

3.1 Løbende kontroller

Løbende kontroller og smøring i henhold til nedenstående skema udføres efter behov for at sikre en god funktion. Vær opmærksom på følgende:

- Eventuelle mislyde.
- Gasstemplets funktion.
- Hjulenes og hjullåsmekanismens funktion.
- Mulig skade på elkabler.
- Motorernes funktion.
- At led og beslag smøres.

3.2 Rengøring

Rengøring af kunstlæder

Lunkent vand og en mild sæbeopløsning, sæbe eller lignende er det mest skånsomme, du kan bruge til kunstlæder.

Desinfektion

Overfladedesinfektion skal bruges, hvis produktet skal desinficeres. Kunstlæderet tåler de mest almindelige spritbaserede overfladedesinficerende midler. På vores hjemmeside finder du en komplet liste over midler, kunstlæderet er testet med.

Klor

Klorbaserede rengøringsmidler anbefales ikke. Klor påvirker både produkter og miljø negativt, også selvom fortyndingskoncentrat samt efterbehandlingen af produktet også spiller ind.

Forbrugskomponenter og reservedele

Produktet har ingen forbrugskomponenter, der skal skiftes med særlige intervaller.

Anvisninger i udskiftning af reservedele såsom hjul, motorer og gasstempler kan rekvireres hos os. Der er specifikke anvisninger for udskiftning af hver reservedel. Kontakt os på telefon +46 (0)660-10580 eller e-mail info@sjobloms.com.

3.3 Tilbehør

Art.nr.	Betegnelse
010-5000-70	Batteribackup
16011000	Undersøgelsesarmatur Halux N50, flexarm
16013000	Undersøgelsesarmatur Halux N50, 2-delt arm
090-5004	Beslag til armatur på gynækologstol

3.4 Reservedele

Art.nr.	Betegnelse
BL141HA11324B-M	Løftesøjle BL1
CB6S654+X2009	Styreenhed CB06
J01297	Håndstyring, 5 knaprækker
2362102000100G4	Motor LA23, slaglængde 100 mm, benplade
J15591	Motor LA23 slaglængde 100 mm, shockleje
J09980	Motor LA31 med kiler, rygstøtte
00771985	Ledhjul, m/centrallås, 100 mm grå

4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

4.1 Produktets levetid

20 år.

4.2 Dimensioner

Længde: 134 cm

Længde inkl. benplade: 174 cm

Bredde: 55 cm

Siddehøjde: 55-95 cm

Maksimal højde ved benpladens yderkant, når den er trukket helt ud, og stolevinklen er helt oppe: 115 cm

Rygstøttens længde: 92 cm

Rygstøttens vinkel: 10-60°

Sædepladens længde: 39 cm

Benpladens længde x bredde: 31x44 cm

Vinkel på shocklejet -22°

Vægt: 97 kg

Løftekapacitet: hhv. 165 kg (016-5000) og 215 kg (016-5020).

4.3 Motorpakke

Ved fuld belastning må motorerne belastes maksimalt 6 minutter/time.

Motorproducenten garanterer en levetid på mindst 10.000 timer. Der er monteret sikkerhedsmøtrikker i kritiske motorer for at forhindre sammenbrud. Maks. brugstid 10 % eller 6 minutter/time ved uafbrudt drift.

4.4 Batteribackup

Alle gynækologstole kan udstyres med batteribackup. Hvis man ikke vælger det ved køb af stolen, udstyres stolen med et udtag bagpå, hvortil man kan tilslutte sin batteribackup. Batterierne, som anvendes i styreenheden, er lukkede blybatterier af samme type som startbatterier i biler. Elektrolytten i blybatterierne er absorberet i glasfibervæv, hvilket betyder, at batteriet kan placeres i en valgfri position.

Den medfølgende netledning sættes i en stikkontakt med 230 volt. Opladeren vil oplade batteriet på mindre end 12 timer. Opladeren kan uden problemer være tilsluttet til opladning i lange perioder, f.eks. 1 uge. Hvis et batteri ikke



bruges i længere tid, vil det gradvist miste sin lagrede energi. Det anbefales derfor, at batterierne oplades mindst 8 timer inden drift.

Batteriets levetid

Batteriets levetid afhænger af flere faktorer, bl.a. afladningsdybden. Hvis batteriet aflades dybt mellem ladningerne, vil levetiden blive reduceret. Det anbefales at oplade så ofte som muligt. Den indbyggede summer "Oplad batteriet", der er indbygget i styreenheden lyder, når batteriet er afladet 50 %.

Batteriernes forventede levetid er ca. 500-1200 opladninger.

4.5 Bortskaffelse af produktet

Når batteriet er opbrugt, bør batteriet afleveres til batteriindsamling for at skåne miljøet.

Produktet kan i øvrigt afleveres til deponi.

5. KONTAKTOPLYSNINGER



Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB

Kavelvägen 4

894 35 SJÄLEVAD

Sverige

Tlf.: +46 (0)660 105 80

Fax: +46 (0)660 180 00

E-mail: info@sjobloms.com

Websted: www.sjobloms.com